

Gebruiksaanwijzing: Maak het sachet met de hand open (niet knippen) en haal het Cura-Heat warmtekompres eruit. Verwijder de papieren beschermlaag. Plak het kompres op de buitenzijde van uw kledingstuk/ondergoed op de pijnlijke plek. Cura-Heat wordt langzaam warm en bereikt binnen ongeveer 30 minuten haar maximale warmte. Cura-Heat wordt door de lucht geactiveerd - maak het sachet daarom pas open wanneer u het gaat gebruiken

Veiligheidsaanbevelingen: •uitsluitend voor uitwendig gebruik •elk warmtekompres is voor eenmalig gebruik •Cura-Heat niet gebruiken bij een rode, ontstoken, beschadigde, geïrriteerde huid of bij bloedingstoringen •Cura-Heat niet gebruiken terwijl u slaapt •indien er huidirritatie optreedt, onmiddellijk stoppen met gebruik •het warmtekompres niet op hele dunne kleding aanbrengen (bv. panty's of kanten lingerie waar de huid in aanraking kan komen met het warmtekompres) •Cura-Heat mag alleen onder toezicht gebruikt worden bij personen die het product zelf niet kunnen verwijderen, zoals ouderen of lichamelijk gehandicapten •Cura-Heat niet gebruiken in combinatie met andere crèmes of lotions die direct op de huid worden aangebracht, of met / naast andere warmtebronnen •indien u last heeft van reumatische artritis, slechte circulatie, zenuwbeschadiging, een zintuigelijke stoornis, een huidaandoening, diabetes of zwanger bent: raadpleeg uw arts om er zeker van te zijn dat warmtetherapie voor u geschikt is •buiten het bereik en zicht van kinderen en huisdieren houden •Cura-Heat niet bij kinderen gebruiken •het warmtekompres niet verbranden •het warmtekompres niet kneden - het geeft binnen enkele minuten warmte af •het warmtekompres niet knippen of scheuren •het warmtekompres niet in de magnetron verwarmen •het warmtekompres niet in contact brengen met water of andere vloeistoffen •gebruik het warmtekompres niet op dunne of tere stoffen - het kleefsel zou deze kunnen beschadigen **Ingrediënten:** •ijzer, actieve koolstof en water •de ingrediënten kunnen schadelijk zijn bij opname door de mond - bij inslikken, de mond met water uitspoelen en onmiddellijk medisch advies inwinnen •indien de ingrediënten in contact komen met de ogen of de huid, deze onmiddellijk met water spoelen. **Bewaren / Uiterste gebruiksdatum:** •op een koele en droge plaats uit het zonlicht bewaren •nooit na de uiterste gebruiksdatum, die op het sachet staat, gebruiken